

Hygiejneplan for Biologisk indikator – sporeprøve

<p><u>Kontrol af autoklave</u></p> <p>Hver måned skal autoklaven testes med <u>biologiske indikatorer (sporeprøve)</u></p> <p>Desuden anvendes dagligt multivariable <u>kemiske indikatorer</u></p>	<p>Sporeprøve:</p> <ul style="list-style-type: none">• Placér 3-6 kapsler, afhængig af autoklavens størrelse• Sporeprøverne placeres på steder der er vanskeligt tilgængelige• Noter på etiketten hvor kapslen placeres i autoklaven• Tag kapslerne ud efter endt autoklavering• Afkøl kapslerne i ca.10 min, dyrkning skal påbegyndes senest 2 timer efter autoklavering• Før dyrkningen anbringes kapslerne (med den brune hætte opad) i en vinkel på ca. 45 grader på indersiden i inkubatoren og dyrkningstiden isættes en ikke-autoklaveret med knust kapsel (kontrol kapsel)• Undersøg de autoklaverede kapsler for vækst første gang efter 24 timer og sidste gang efter 48 timers dyrkning• Violet farve viser ingen vækst og dermed at autoklaven er ineffektiv• Kontrol kapslen skal efter dyrkningen i 24 timer i inkubatoren vise farveomslag gul. Ellers er der problemer med kapslerne eller dyrkningen• Hvis de autoklaverede kapsler skifter farve til gul farve, dvs. autoklaveringen har været ineffektiv, gentages kontrollen af sterilisationsproceduren på samme vis• Ved fortsat ineffektiv procedure bør autoklaven kontrolleres af teknisk personale, og reparation udføres. Destruer kapslerne på samme måde som andet stikkende/skærende affald• Der føres protokol over test med dato og resultat	<p>Sporeprøve 1 gang i måneden og efter reparation eller driftstop af autoklaven</p> <p>Ansvarlig TKA</p>
---	--	---